

РАПИДАН ОПТИМА

СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – 10 мМЕ/мл

БЫСТРО

ТОЧНО

ПРОСТО

**ЗА 7 ДНЕЙ ДО ОЖИДАЕМОЙ
МЕНСТРУАЦИИ**

СХЕМА ПОШАГОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ЧЕЛОВЕКА (ХГЧ) В МОЧЕ



1. Извлеките тест из защитной упаковки.



2. Снимите защитный колпачок.



3. Подставьте приемную часть тест-кассеты с 5-ю маленькими отверстиями непосредственно под струю мочи на **7–10 сек.** Тест следует держать почти вертикально



4. После извлечения теста из под струи мочи немедленно наденьте колпачок, положите тест на сухую горизонтальную поверхность окошками теста «Т» и «С» вверх на **3–10 мин.**



5. После указанного времени считайте результат. Результат достоверен в течение первых **10 мин.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Тест можно использовать только 1 раз
- Результат теста, полученный по истечению 10 минут, недействительный
- Не использовать тест с истекшим сроком годности
- Хранить в местах, недоступных для детей.

При проведении теста желательно использовать первую утреннюю мочу, так как в ней содержится максимальная концентрация ХГЧ.

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

«С» (control) – зона контроля, «Т» (test) – тестовая зона



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. «Вы не беременны».

Только одна красная полоса в зоне «С»
Если тест показывает «Вы не беременны», а вы подозреваете, что беременны, то следует повторить тест через несколько дней и проконсультироваться с врачом.



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. «Вы беременны».

По одной красной полосе в зоне «С» и зоне «Т»
В этом случае, пожалуйста, немедленно проконсультируйтесь с врачом, который будет наблюдать Вас и информировать о течении беременности.



ОШИБОЧНЫЙ. Текст недействителен

Нет видимых полос в зонах «С» и «Т»

Тест проведен неправильно. Пожалуйста, повторите тест заново с новым комплектом и убедитесь, что тест проведен с учетом инструкции.



ОШИБОЧНЫЙ. Текст недействителен

Только одна красная полоса в тестовой зоне «Т» и нет полосы в контрольной зоне «С»

Не допускайте возможности причинения вреда эмбриону, избегая воздействия рентгеновского излучения и т.п.

ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗМОЖНЫ:

- при приеме лекарственных препаратов, содержащих ХГЧ (Прегнил, Профази). Проведение анализа возможно после окончания приема препаратов в сроки, составляющие не менее 10 дней.
- при наличии заболеваний, связанных с выделением в мочу ХГЧ (злокачественная опухоль молочной железы, рак легких, опухоль яичников, аномальный рост клеток в матке, обуславливающих повышенный уровень ХГЧ).


ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- при проведении теста раньше положенного срока (при нерегулярном менструальном цикле), т.е. в период, когда в моче еще не появилось достаточного количества ХГЧ;
- при патологии почек и сердечно-сосудистой системы, тормозящей выведение ХГЧ с мочой;
- при употреблении большого количества жидкости или мочегонных препаратов перед тестированием

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

РАПИДАН ОПТИМА – струйный тест для ранней диагностики беременности. Предназначен для определения в моче особого гормона – хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), который начинает вырабатываться организмом с наступлением беременности.

Этот гормон может присутствовать в здоровом организме мужчин и женщин, но его концентрация в норме не превышает 5 мМЕ/мл. При наступлении беременности организм женщины начинает вырабатывать этот гормон в больших количествах. Уже к концу 2-й недели после зачатия концентрация ХГЧ превышает 100 мМЕ/мл и достигает максимума 200.000 мМЕ/мл к 12 недели беременности, поэтому ХГЧ считают «маркером беременности».

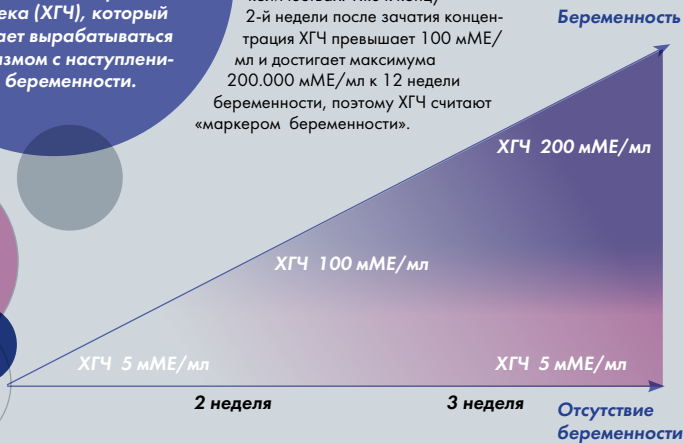

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА
№ ФСЗ 2011/10387 от 20 сентября 2011

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Тюрклуб Тыбби Малземелер
Санайы ве Тиджарет Аноним Щиркети
Адрес: И.А.О.С.Б. 10040 Сокак №20 35620 Чигли Измир, Турция
Тел.: 0090 2323768081, Факс: 0090 2323768040

ДИСТРИБЬЮТОР: ООО «МедопроеВет»,
Россия, 107045 Москва, Рождественский б-р, д. 9, стр.1
Тел/факс: +7 (495) 710-77-25